

## NÁVOD NA POUŽITIE

### Účel použitia

SÚPRAVA NA BEZPEČNÉ ODSTRÁNENIE KLIŠŤOV je zdravotnícka pomôcka určená na odstránenie kliešťov z ľudského tela a tela zvierat.

Odporúča sa na prevenciu chorôb prenášaných kliešťami, ako je Kliešťová encefalitída, Lymfská borelióza, Babezióza, Anaplazmóza a iné.

### Mechanizmus účinku


Zmrazi kliešťa a zabráni vyprázdneniu nákazlivých výlučkov pri odstraňovaní.

Technológia vedie k precíznemu pokrytiu trupu kliešťa, čo chráni pred porušením tela kliešťa, a tým znižuje riziko kontaktu s pôvodcom infekcie počas procesu odstraňovania.

Obsahuje Odstraňovač kliešťov pre bezpečné a efektívne odstránenie kliešťov, čo navyše znižuje riziko prenosu infekčných látok počas odstraňovania.

### Návod na použitie

#### Krok 1: Zmrazenie prisátého kliešťa

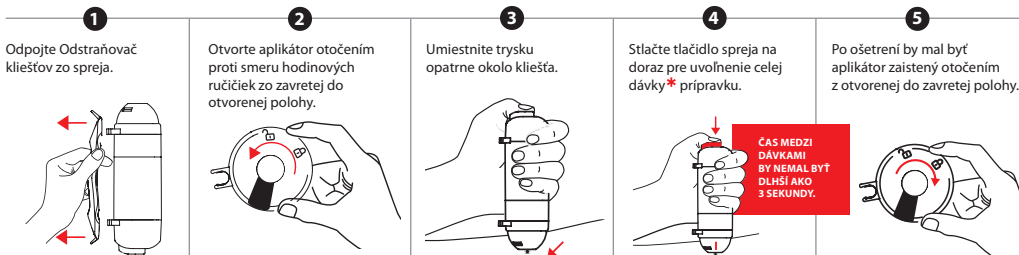

**! Pred prvým použitím stlačte tlačidlo spreja dvakrát.**



\* počet dávok závisí od veľkosti kliešťa (pozri tabuľku nižšie):

Larva a nymfa Kliešťa obyčajného (*Ixodes ricinus*)

1 dávka



háčik A

Samička Kliešťa obyčajného (*Ixodes ricinus*)

2 dávky



Samička Pijaka lužného (*Dermacentor reticulatus*)

2 dávky



MIERKA 2:1

#### Krok 2: Odstránenie zmrazeného kliešťa

K odstráneniu zmrazeného kliešťa podľa zdravotných odporúčaní použite Odstraňovač.

Použitie pomôcky v súlade s návodom umožňuje odstránenie neporušených kliešťov a znižuje riziko prenosu pôvodcov infekcie počas odstraňovania.



### DÔLEŽITÉ!

- Nevhodná pomôcka môže viesť k poškodeniu kliešťa a ku kontaktu s infekčnými látkami.
- Na zabránenie priameho kontaktu s kliešťom sa odporúča používať ochranné rukavice počas procesu odstraňovania.
- Neskoré odstránenie kliešťa vedie k trvalému pripojeniu častí jeho ústnej dutiny, čo zapríčiňuje oveľa ťažšie odstránenie. Zvyšné časti kliešťa, uchytané v koži, musia byť odstránené lekárom.

### Ďalšie informácie

**Ak je kliešť v ťažko dostupnej oblasti, ako je podpazušie, za ušami alebo okolo slabin, možno budete musieť niekoho požiadať, aby vám pomohol s odstránením.**

Po odstránení kliešťa sledujte ošetrovanú oblasť niekoľko týždňov. Výskyt lokálneho alebo celkového zápalu môže byť dôsledkom prenosu infekčných látok parazitom. V prípade pocitu nevoľnosti, horúčky alebo výskytu erytému, ktorý je charakteristický pre Lymfskú boreliózu, musíte okamžite kontaktovať svojho lekára alebo lekárnik.

### Upozornenia a opatrenia

- Používajte len podľa pokynov, postupujte podľa návodu.
- Nepoužívajte u detí do troch rokov.
- Použitie u detí len pod dozorom dospelého osoby.
- Nepoužívajte na kožné lézie.
- Nepoužívajte v prípade alergie na ktorúkoľvek zložku.
- Nevydychujte.
- Vysoké dávky môžu spôsobiť začervenanie. V takomto prípade okamžite prestaňte používať túto zdravotnícku pomôcku, umyte pokožku veľkým množstvom teplej vody (nie horúcej) a osušte ju.
- V prípade pretrvávajúcich zmien na pokožke (vyblednutie alebo začervenanie, opuch, bolesť) kontaktujte svojho lekára alebo lekárnik.
- **Len na vonkajšie použitie.**

**Prisátého kliešťa treba odstrániť veľmi opatrne, použitím vhodnej veľkosti háčika (A alebo B).**

**Vyber háčika na Odstraňovač kliešťov má byť prispôbený veľkosti prisátého kliešťa (larva, nymfa alebo samička).**

### Obsah súpravy na bezpečné odstránenie kliešťov a jej zloženie

- Sprej na okamžité zmrazenie kliešťa: izohexadekan, izopropylmyristát, 1,1,1,2-tetrafluóretán
- Odstraňovač kliešťov na bezpečné odstránenie kliešťov
- Skúmavka

### Výstraha!

Súprava obsahuje tlakovú nádobku. Po zahriatí môže explodovať. Uchovávajte mimo zdroja tepla, horúcich plôch, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Neprepichujte a nepáľte, ani keď je nádobka prázdna. Chráňte pred priamym slnkom. Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

### Skladovanie

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe, mimo dosahu detí, pri teplote do 40 °C.


### Distribútor

Ceumed s.r.o., Komenského 856  
929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika

**Účinnosť:** zdravotnícka pomôcka obsahuje **60 dávok**, ktoré umožnia bezpečné odstránenie **40 kliešťov**.



Číslo šarže a dátum expirácie sú uvedené na spodnej strane obalu.

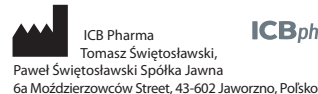

Dátum poslednej revízie textu: 04.2018